


BiTrac MaxShield Select™ Pediatri Maske Ayarlama



1. Hastanın yüzünü uygun maskeyi bulmak için maske ile verilen boyut kılavuzunu kullanın.

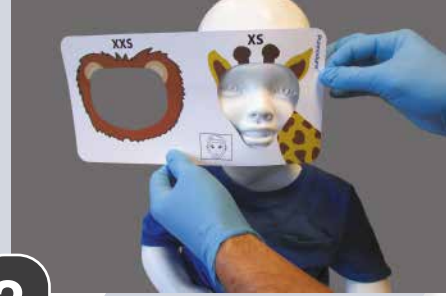

2. Ölçü kılavuzunun kesik kısmı, hastanın kaşlarının hemen üstüne ve alt dudağın hemen altından geçmelidir.



3. Hastaya uygun ölçüdeki maskeyi hastanın yüzünde tutun. Ardından maske başlığı hastanın başının arkasından geçirin.



4. Maske başlık klipslerini yerine yerleştirin ve maskeyi hastanın yüzüne sabitleyin. Bu adımda tıklama sesi duyulmalıdır.



5. Maske üst velcro bantlarını uygun şekilde ayarlayın. Maske bantlarının AŞIRI SIKILMADIĞINDAN emin olunuz.



6. Maske üst bantlarını ayarladıktan sonra alt velcro bantlarını ayarlayın.



7. Maske bantlarını ayarladıktan sonra, maskenin hareket etmediğinden emin olun. Maske silikonun kaşın üstünde ve alt dudağın altında olduğundan emin olmak için kontrol edin.

Görseldeki manken tahmini 1 yaş ölçülerindedir